

Istruzioni d'uso:

1. Inserire il manico di plastica blu nella fessura del paradenti per poi inserirlo in un contenitore
2. Versare acqua calda (circa 70-80 C°) nel contenitore fin quando il paradenti non è ricoperto completamente
3. Lasciare il paradenti in acqua calda per circa 15-25 secondi, per poi recuperarlo usando il manico.
4. Eliminare delicatamente l'acqua in eccesso e portare il paradenti alla bocca. Usate le dita nella parte laterale e frontale del paradenti per regolarlo in posizione comoda e poi morderlo in modo tale che la gomma aderisca alla forma dei denti.
5. Rimuovere il paradenti una volta che si ha la sensazione che quest'ultimo si sia irrigidito e stabilizzato.
6. Immergere il paradenti in acqua fredda per fissare la forma, per poi riporlo nella sua custodia rimuovendo il manico.



Il paradenti è realizzato in materiale EVA di alta qualità, il procedimento può essere ripetuto fino al raggiungimento della forma desiderata.


Principio di funzionamento:

SENZA



Punto di restrizione dell'aria.
ausa vibrazioni incontrollate
(Russare)

CON

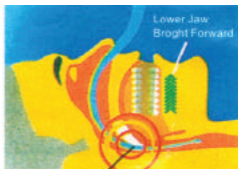

Il punto di restrizione viene
risolto, nessuna vibrazione e
flusso d'aria costante (Senza
Russare)

Stop Snoring
Solution
Quality Sleep
Harmony Life

